






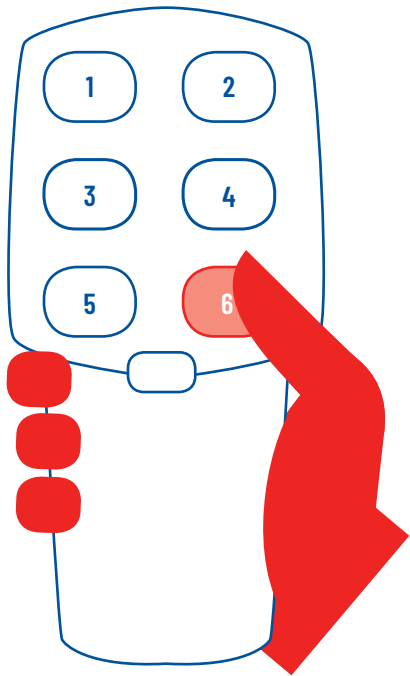


Kurzanleitung domiflex, domiflex niedrig classic,
domiflex niedrig, domiflex 185, adiflex 220

Handscharter




- 1  Rückenteil nach oben
- 2  Rückenteil nach unten
- 3  Fußbügel nach oben
- 4  Fußbügel nach unten
- 5  Liegefläche nach oben
- 6  Liegefläche nach unten

Sperrfunktion

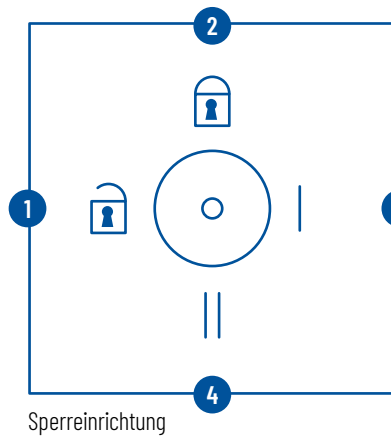

- 1, 3, 4:**
Alle Funktionen ausführbar
- 2:**
Alle Handscharterfunktionen gesperrt

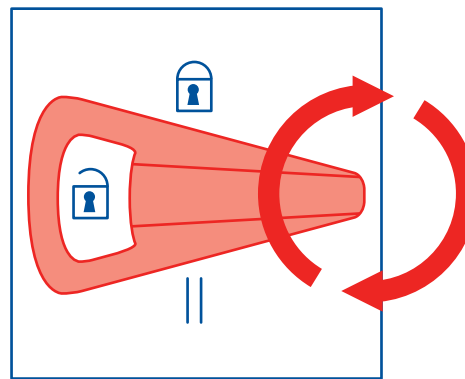

Schlüssel für die Sperrereinrichtung




.bock^{///}



Rollen


Zum Fixieren des Bettes an einem Standort müssen die Feststellhebel an allen vier Rollen mit dem Fuß nach unten bewegt werden.

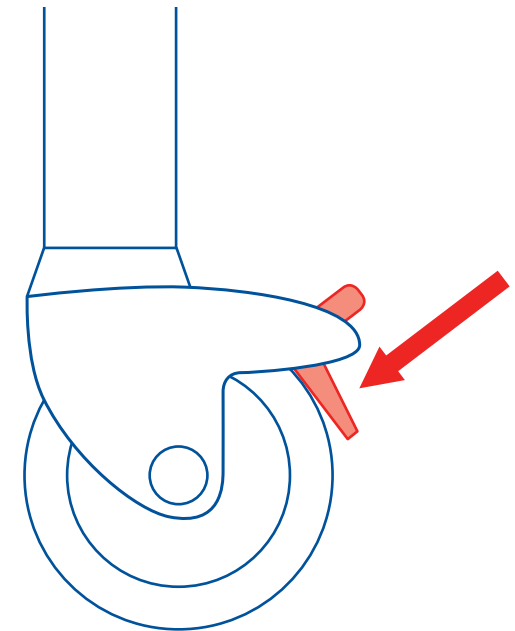


Wichtiger Hinweis:
Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung des Pflegebetts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise! Vielen Dank.




Seitensicherung

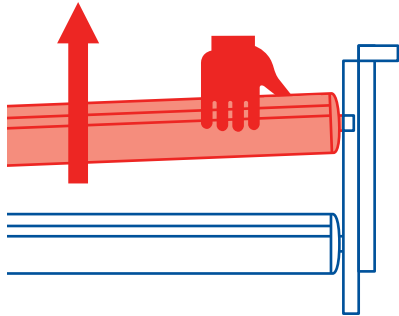


Schritt 1: Holm greifen und leicht anheben.

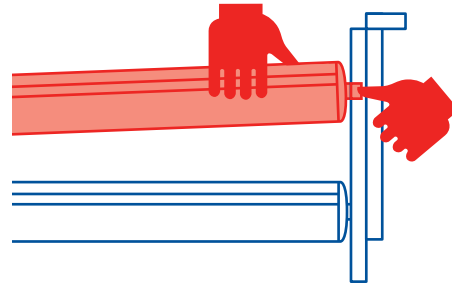

Schritt 2: Auslöseknopf drücken.
Beachten Sie: Heben Sie unbedingt die Seitensicherung leicht an und drücken dann erst den Auslöseknopf!

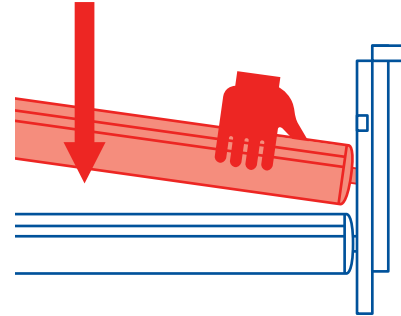

Schritt 3: Absenkung nach unten.
Beachten Sie: Beide Seiten müssen abgesenkt werden!

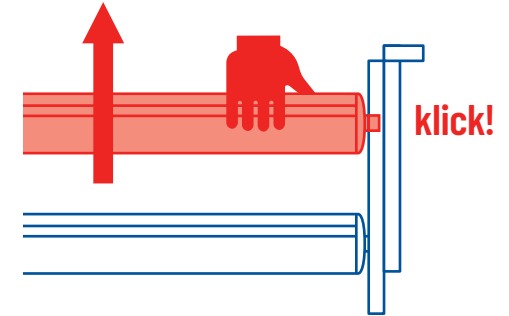

In die oberste Position als Herausfallschutz bringen:
Seitensicherung so weit nach oben ziehen bis sie an den Enden hörbar einrastet.


Aufrichter




Schritt 1: Aufrichter in vorgesehene Buchse am Kopfteil stecken und arretieren.

Achtung: Aufrichter nicht außerhalb der Liegefläche schwenken

Wichtiger Hinweis:
Die sichere Arbeitslast des Aufrichters beträgt max. 75 kg.

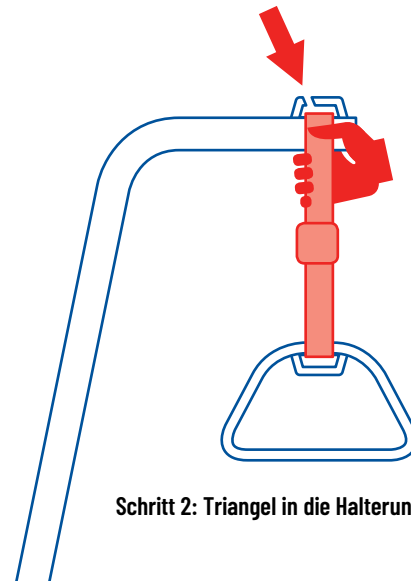

Schritt 2: Triangel in die Halterungsöse einhängen.

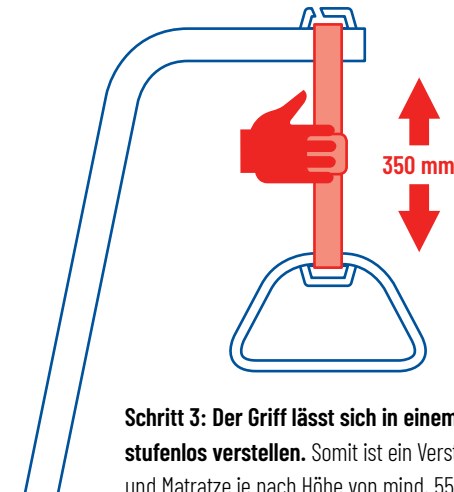

Schritt 3: Der Griff lässt sich in einem Bereich von 350 mm stufenlos verstellen. Somit ist ein Verstellbereich zwischen Griff und Matratze je nach Höhe von mind. 550 – 850 mm möglich.